

BLOODGENETICS

Diagnostics in Inherited Blood Diseases

Edificio LABCO

Verge de Guadalupe, 18, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona

Tel. (+34) 636147238

info@bloodgenetics.com

www.bloodgenetics.com



PROCEDIMIENTO DE ENVÍO DE MUESTRAS PARA ESTUDIOS GENÉTICO Y BIOQUÍMICOS DE BG

Enviar por **correo ordinario** a **BLOODGENETICS (BG)** los siguientes documentos:

- **OBLIGATORIO: Solicitud de estudio** debidamente cumplimentada.
- **OBLIGATORIO: Consentimiento informado de Diagnóstico genético** firmado por el paciente (o por un tutor/progenitor en caso de que el paciente sea menor de edad).
- **Consentimiento informado de investigación** firmado por el paciente (o por un tutor/progenitor en caso de que el paciente sea menor de edad) en el caso de que el paciente esté interesado en participar en un proyecto de investigación.
- **Cuestionario e informes médicos** dependiendo del estudio solicitado.
- En el supuesto de que se trate de un caso familiar, es necesario el envío de un pedigree de la familia además de **documentos independientes** para cada uno de ellos.

Antes del envío de las muestras, BG recibe y verifica estos documentos y procede a la revisión de los informes y a la adecuación de los estudios genéticos pertinentes en cada caso. En caso de duda sobre qué estudio genético es adecuado realizar, BG puede asesorar al médico, tras la petición del estudio. Si alguna documentación no es correcta, se contacta vía e-mail o telefónica con el médico solicitante para obtener la información necesaria.

De acuerdo con la LOPD, estos documentos han de ser enviados por correo ordinario y **NUNCA VIA MAIL**.

Así mismo se ruega que no se incluyan datos personales (nombre, fecha de nacimiento, número de historia clínica...) ni se envíen informes médicos con datos confidenciales cuando se haga una consulta sobre un paciente utilizando el email.

Si toda la documentación es correcta, se asigna un nº de caso y de paciente a la muestra y se envía al médico el presupuesto del estudio solicitado. Este presupuesto ha de devolverse firmado (por correo ordinario o por mail) y una vez recibido BG avisa al médico para que proceda al envío de las muestras.

En lo sucesivo se utilizará esta codificación siempre que se quiera hacer una consulta sobre ese caso. No se responderán consultas en las que se haga referencia al paciente utilizando su nombre

Es importante tener en cuenta:

1. Aviso importante para las muestras enviadas desde un país fuera de la Unión Europea.
Por favor, incluya exclusivamente nuestro documento "factura proforma" junto con las muestras para evitar que el paquete sea retenido en aduana.
En caso contrario, si la muestra queda retenida, los gastos correrán a cargo de quién envíe la muestra.
2. Volumen de muestra a enviar:
 - a. Estudio genético. **Sangre total en EDTA**. Mínimo 5 ml para el y 5 ml adicionales en el caso de que el paciente haya firmado el consentimiento de investigación.
 - b. Medida de hepcidina sérica. **1 ml de plasma (heparina) o suero centrifugado recogidos por la mañana**, almacenados en un **tubo de 2 ml-propileno** para. Es muy **importante recoger las muestras por la mañana (7:00-9:00 am)** en **sujetos en ayunas**.

BLOODGENETICS

Diagnostics in Inherited Blood Diseases

Edificio LABCO

Verge de Guadalupe, 18, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona

Tel. (+34) 636147238

info@bloodgenetics.com

www.bloodgenetics.com



1. La muestra debe ser enviada fresca o congelada en hielo seco. Por favor, evitar los ciclos de congelación y descongelación. Para cada muestra se debe especificar en el documento de la solicitud de estudio qué tipo de muestra (plasma/suero) y estado (fresco/congelado) se envía.
 - c. Medida de LPI. **1 ml de suero fresco o congelado en hielo seco.**
 1. Por favor, evitar los ciclos de congelación y descongelación. Para cada muestra se debe especificar en el documento de la solicitud de estudio el estado (fresco/congelado) en que se envía.
 - d. Si se envía una muestra de **ADN**, se necesitará como mínimo 3ug por cada petición que conste en la solicitud de estudio.
Por favor, desde países fuera de la Unión Europea, enviar preferentemente ADN (no sangre).
3. Enviar las muestras por correo urgente (entrega en 1-2 días) a temperatura ambiente y en embalaje apropiado para muestras biológicas (estuche con espuma para proteger los tubos de los posibles golpes). Es importante dirigirlas a **BLOODGENETICS** e incluir el texto de la entrega en negrita puesto que en el centro existen otras unidades de diagnóstico.

BLOODGENETICS S.L.

C/Verge de Guadalupe, 18 Edificio Labco (**entregar en recepción de la entrada principal**)

08950 Esplugues de Llobregat

Barcelona

Tel. (+34) 636 147 238

El centro que remite las muestras debe cargar con los costes de envío.

Contactar por mail con la info@bloodgenetics.com para informar del envío de la muestra (de esta manera BG estará alerta para la correcta recepción).

4. El horario de recepción de muestras será de **lunes a jueves de 9.00 a 17.00h** (se ruega evitar el envío los jueves y viernes) para poder verificar su integridad y realizar así el correcto registro.
5. BG contactará con el médico para informarle de la llegada de las muestras.
6. Una vez completado el estudio, se remite por correo certificado un informe con los resultados obtenidos, así como la factura del estudio realizado cuyo importe debe ser abonado en los 60 días posteriores a la finalización del estudio.